

# ASPI VENIN

## LE PRODUIT :

- Pour soins de 1<sup>ère</sup> urgence.
- Mini-pompe manuelle avec ventouse pour extraire le venin après morsure de reptiles, poissons ou piqûres d'insectes.
- Petit et léger, se manipule d'une seule main. Réutilisable.

## MODE D'EMPLOI :

- Tirer le piston complètement après avoir fixé la ventouse appropriée.
- Placer la ventouse sur la peau. Si la peau est poilue, humecter le bord de la ventouse.
- Placer la pointe du pouce sur le piston et le bout des doigts sous les oreillettes de la pompe.
- Pousser le piston énergiquement et à fond de course sans jamais le lâcher du pouce tant que l'aspiration n'est pas effective.
- Vous noterez immédiatement la puissante aspiration qui élimine venin ou poison. Maintenir 1 à 2 minutes. Plus si nécessaire.
- Pour décompresser, soulever le piston avec la pointe du pouce.

## PRESENTATION :

- Sachet minigrip 2 embouts ref 07080
- Coffret avec 4 embouts ref 07081

REMARQUE : Ne pas utiliser sur les endroits sensibles tels paupières ou organes génitaux.



---

S.A. Eurodist N.V.

143 chaussée de Namur 1402 Thines (Belgium)  
Tel : 32 67 63 49 90 Fax : 32 67 84 11 84  
www.eurodist.be E Mail : [info@eurodist.be](mailto:info@eurodist.be)