

PROTEGE PANSEMENT LATEX

LE PRODUIT :

- Ce pansement est composé uniquement de latex pur, il résiste efficacement à l'eau, aux huiles et aux graisses.

APPLICATIONS :

- Protection du pansement auto-adhésif.
- Protection des blessures contre les petits chocs.

MODE D'EMPLOI :

- Découper la bande latex à l'aide d'une paire de ciseaux.
- Enlever le papier de protection.
- Entourer le doigt à protéger en étendant légèrement la bande.
- Tirer sur la bande de latex et ensuite bien pincer afin de souder les deux parties l'une à l'autre.
- Découper à l'aide d'une paire de ciseaux le superflu de latex pour obtenir un fini parfait.
- Votre doigt est protégé.

Remarque : Evitez de garder ce protège pansement plus de dix heures consécutives afin de prévenir toute macération.

PRESENTATION :

- En vrac (Unité) ref 01094
- Tube de deux rouleaux 5cmx0,85m ref 01095



S.A. Eurodist N.V.

143 chaussée de Namur 1402 Thines (Belgium)
Tel : 32 67 63 49 90 Fax : 32 67 84 11 84
www.eurodist.be E Mail : info@eurodist.be