



Your partner in first aid

SANOCOOL

LE PRODUIT :

Pansement hydrogel transparent stérile à base de polyuréthane. Contenance en eau de 60% et rebords adhésifs hypoallergéniques anti bactériens.

APPLICATIONS :

- ✓ Ecorchures, éraflures, etc.
- ✓ Brûlures 1^{er} et 2^{ème} degré

ACTIVITES :

- ✓ Crée un environnement humide qui favorise la cicatrisation des plaies. Procure également un effet apaisant et refroidissant.
- ✓ N'adhère pas aux blessures, de plus l'effet matelassé protège la plaie des agressions extérieures.
- ✓ Permet l'évaporation de gaz et des vapeurs d'eau tout en évitant la macération.
- ✓ Ne laisse aucun résidu sur la plaie lorsque le pansement est enlevé.
- ✓ La transparence permet de contrôler l'évolution de la plaie sans enlever le pansement.
- ✓ Ne pas utiliser sur des brûlures du 3^{ème} degré ou des plaies purulentes.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Ouvrir l'emballage, détacher une des protections (côté collant), appliquer fermement la partie collante sur la peau et ôter la deuxième protection. Contrôler que le pansement colle entièrement sur la peau.
- ✓ Détacher ensuite le film protecteur supérieur.

PRESENTATION :

Emballé individuellement dans un sachet stérile, 2 dimensions disponibles

- ✓ Forme ovale 68x43mm ref 08050
- ✓ Forme rectangulaire 75x100mm ref 08051

COMPOSITION :

Aqua, propolymère, propylèneglycol, sodium hydroxide.



S.A. Eurodist N.V.

10 rue Louis Braille 1402 Nivelles (Belgium)

Tel : 32 67 63 49 90 -- Fax : 32 67 84 11 84

E Mail : info@eurodist.be - Web : www.eurodist.be